

# HAS 防災用簡易ベッド

関西広域連合 新商品調達認定制度 認定商品  
堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業



## HAS 防災用簡易ベッドの特徴

### ■担架としての使用が可能

シートを張るフレーム部分とシートを支える脚が簡単に分離でき、持ち手がついていることから、担架として使用できます。

### ■「寝心地抜群」の快適性

折りたたみ椅子と同じ構造で、利用者の自重でテンションが決まるため、違和感のない自然な寝心地を提供できます。さらにメッシュシートの採用により、体圧分散性を活かした最高の寝心地を実現しています。

### ■「組み立てやすく撤収しやすい」利便性を向上

力のない方でも扱えるよう、フレームの構造や部品構成を工夫し、マニュアルを読まなくても簡単に組み立てが出来る設計により、利便性を向上させています。

### ■メッシュシートの採用により水や汚れに強い

メッシュの合成繊維は、水や汚れにも強く、避難場所等の劣悪な環境の中でも衛生的な使用が可能です。

### ■消防庁防災規格適合の建築用養生シートを採用

工事現場等の落下防止のための建築用養生シートを簡易ベッドのシートとして採用していますので、非常に丈夫で、燃焼時に有毒ガスを発生するハロゲン系の物質は使用していません。

※仮設工業会認定特定品(強度、落下試験等を実施)

※消防庁防災規格適合品



## 災害時における簡易ベッドの必要性

### ①エコノミー症候群の防止

2004年の新潟県中越地震では、自動車での避難生活が原因でエコノミークラス症候群が原因と見られる死亡が相次ぎました。寝心地のよい簡易ベッドを使用することで、劣悪な睡眠環境での事故を防ぐ事ができます。

### ②粉塵による「呼吸器障害」の防止

今回の大震災では、津波が原因で乾いた泥から細かい粉塵が巻き上がっています。歩行により舞い上がる粉塵の吸引を防ぐのに、簡易ベッドの使用が有効です。

### ③体力の無い高齢者の寝起きを援助

筋力が低下し衰弱した高齢者が寝起きする際、床から起き上がるより、簡易ベッドからの寝起きが負担を軽減できます。

(石巻赤十字病院呼吸器外科  
植田信策氏のコメント参照)

- 都道府県市町村、ライフライン関連企業の防災必需品ベッドとして！
- 災害拠点での、簡易診療台や搬送担架に！
- あらゆる職場や地域で、緊急時の仮眠に使える簡易ベッドにも！



### 仕様

寸法	W2,000XD650XH300
重量	7.3Kg
対荷重	95Kg
本体フレーム	Φ32x3t アルミパイプ
ジョイント部	Φ25x3t アルミパイプ
脚部	Φ25x3t アルミパイプ パイプ材は全てアルマイト加工
シート素材	ポリエステル、ポリ塩化ビニル(防災認定品)

## HIGASHINO

HAS PROJECT

株式会社東野朝商店

〒591-8031大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5-410


TEL:072-253-2088 FAX:072-259-6568

info@has-factory.jp <http://www.higashinoasa.com>

# HAS 防災用簡易ベッド兼(担架)

## 取扱説明書

関西広域連合 新商品調達認定制度 認定商品  
堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業開発商品

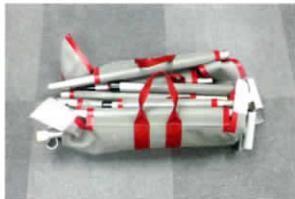

① 平らな所に置いて下さい。



② 本体を払って下さい。




③ 脚部分を別の場所に置いて  
本体を払って下さい。




④ 左右パイプが入った状態で  
払って下さい。



⑤ パイプを接続してください  
左右6ヶ所(カチッと音が  
するまではめて下さい。)  
(※指などお挟まないように  
注意して下さい。)

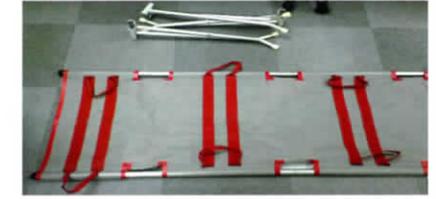


⑥ 6ヶ所が繋がりましたら、裏返して下さい。  
(赤いテープが見えるほうが裏です。)

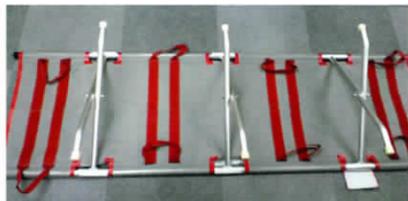

⑦ 脚を3本広げながら、パイプに押し込  
むようにはめて下さい。  
(※指を挟まないように注意して下さい。)  
※脚と本体パイプを確実に固定しないま  
ま使用すると転倒の危険があります  
ので特にご注意下さい。


※パイプと脚金物をマジック  
テープで固定して下さい。

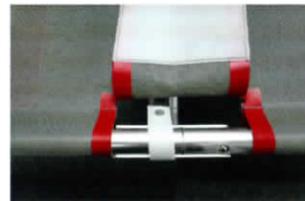

⑧ 脚がはまりましたら、本体を  
反転させ脚と本体がシッカリ  
接合されている事を確認下  
さい。



⑨ シートの内側を手で押さえ  
ながら、パイプ部分のカバー  
を固定して下さい。

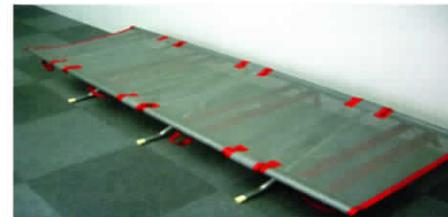

⑩ 完成です。  
(※収納の際はこの逆手順で行って下さい。)  
(※収納の際は本体を裏返し図⑦のようにして、  
マジックテープを先にはがし脚を本体パイプ長  
手方向に倒すようにして外して下さい。)



■両サイドの脚を外し4人でフックを持つと  
担架にもなります。

### 使用上の注意

#### 禁止事項

- ▼ベッドは1人用です。2人以上での使用はしないで下さい。
- ▼ベッドの上に立ったり、飛び跳ねたりしないで下さい。
- ▼転倒注意

本製品は構造上、端部に脚がありません。端部に体重を掛けると、反対側が持ち上がり、転倒する場合があります。本体端部に偏って体重を掛けないようにご注意下さい。

又、脚と本体パイプを確実に固定しないまま使用すると転倒の危険がありますので特にご注意下さい。

#### ▼指はさみ注意

組み立て収納時には、接合部分などで指を挟まないように十分ご注意下さい。  
(お子様や高齢者での組み立てはなさらないようにお願いします。)  
(組み立て収納時には手袋を付けていただく事をお勧めいたします。)

- 担架としてご使用される際は本体パイプを抜いて、大人4人で必ず取っ手をお持ち下さい。また、坂道や階段を下りる際は頭部を上方向で搬送下さい。

### 仕様

寸法	W2,000XD650XH300
重量	7.3Kg
対荷重	95Kg
本体フレーム	Φ32x3t アルミパイプ
ジョイント部	Φ25x3t アルミパイプ
脚部	Φ25x3t アルミパイプ パイプ材は全てアルマイト加工
シート素材	ポリエステル、ポリ塩化ビニル(防災認定品)

## HIGASHINO

HAS PROJECT

株式会社東野朝商店

〒591-8031大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5-410

TEL:072-253-2088 FAX:072-259-6568

info@has-factory.jp <http://www.higashinoasa.com>